



mediroyal

Orthoses are our passion

Mediroyal Multi-fingerskena

Fingerskador är en av de mest komplexa skadorna att ortosbehandla eftersom skenan både behöver en låg profil, funktion och ändå vara flexibel och anpassningsbar. Efter ett stort utvecklingsprojekt och materialtester har vi tagit fram vår egen Multi-fingerskena som kan användas för många olika fingerproblem. Det är en flexibel skena som finns i 14 storlekar/längder och neutralt grå färg.

Flexion

Extension

Mediroyals Multi-fingerskena är tillverkad i formsprutad nylon och polypropylen som ger både stöd, stabilitet och flexibilitet. Materialet kan omformas och justeras med hjälp av en varmluftspistol. Lämplig temperatur är 140–160 grader C.

I vårt designarbete har vi också gjort den ena delen av skenan lite bredare. Denna sida är markerad med ett X på utsidan. Eftersom de flesta fingrar har en konisk form gör detta appliceringen enklare genom att skenan kan vändas för en bättre passform. Skenan kan tvättas i tvål och vatten eller med alkohol.

Skenan kan vändas på fingret för olika funktioner/stabilitet; både extension, flexion och för deviation.

Exempel på applikationer:

- Extensionsstöd för DIP- eller PIP-lederna för svanhalsdeformitet eller hypermobilitet.
- Flexionsstöd för DIP- eller PIP-lederna för malletfinger, knapphålsdeformitet, triggerfinger/tumme.
- Deviationsstöd för DIP- eller PIP-lederna för ulnar/radialdeviation eller kollateralligamentskador.

Mediroyal Multi-fingerskenan finns i singelpack, 3-pack och i en sortimentsförpackning med en styck av varje storlek.

Indikationer: Svanhalsdeformitet, malletfinger, knapphålsdeformitet, triggerfinger/tumme, ulnar/radialdeviation, skador på kollateralligamenten eller vid hypermobilitet.

Storlekstabell och förpackningsvarianter

© Mediroyal Nordic AB 2022

Mediroyal Nordic AB · Box 7052 · 192 07 Sollentuna · Sweden · Tel +46 8 506 766 00
info@mediroyal.se · facebook.com/Mediroyalnordic · www.mediroyal.se

A. Triggerfinger/tumme




B. Svanhalsdeformitet



C. Boutonnière deformitet/Knapphålsdeformitet



D. Droppfinger

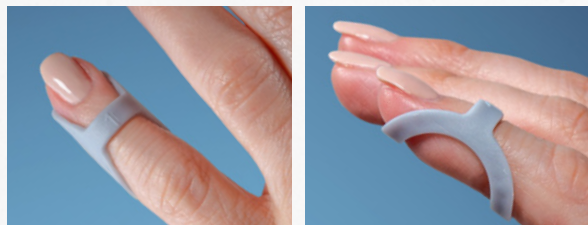

E. Skador på kollateralligamenten/Hypermobilitet



Förpackningsvarianter

Multi-fingerskena Singelpack

Strl	Art.nr	Kvantitet
1	2008-01	1 st
2	2008-02	1 st
3	2008-03	1 st
4	2008-04	1 st
5	2008-05	1 st
6	2008-06	1 st
7	2008-07	1 st
8	2008-08	1 st
9	2008-09	1 st
10	2008-10	1 st
11	2008-11	1 st
12	2008-12	1 st
13	2008-13	1 st
14	2008-14	1 st

Multi-fingerskena 3-pack

Strl	Art.nr	Kvantitet
1	2008-01/03	3-pack
2	2008-02/03	3-pack
3	2008-03/03	3-pack
4	2008-04/03	3-pack
5	2008-05/03	3-pack
6	2008-06/03	3-pack
7	2008-07/03	3-pack
8	2008-08/03	3-pack
9	2008-09/03	3-pack
10	2008-10/03	3-pack
11	2008-11/03	3-pack
12	2008-12/03	3-pack
13	2008-13/03	3-pack
14	2008-14/03	3-pack

Multi-fingerskena - Sortimentförpackning

Strl	Art.nr	Kvantitet
1-14	2009	en skena av varje storlek

Storlekstabell

Observera att måttabellen är en rekommendation för att välja rätt storlek. Den tar inte i beaktande mjukdelssvullnad eller förekomst av ödem. Eftersom de flesta fingrar har en konisk form har skenan en bredare del för att kompensera för detta. Vi rekommenderar en individuell utprovning för bästa funktion.

Storlek	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Omkrets DIP/PIP-led mm	42-43	44-46	46-50	50-55	55-58	58-60	60-62	62-65	65-68	67-71	71-74	74-77	77-81	81-84
Skenans längd mm	26	29	31	33	33	35	39	39	40	43	43	45	45	45

