



mediroyal

Orthoses are our passion

NRX®

## Heat Tape för material

I samband med lanseringen av Mediroyal Material har vi tagit fram en specialtejp med ett värmeaktiverat limster som kan användas för att ersätta sömnad av material eller för att täcka sömmar som skaver. Tejpen är 22 mm bred och kommer på en 10 meters rulle.

Den rekommenderade arbetstemperaturen för att aktivera limmet är 120–140 grader Celsius och tiden som behövs är ca 10 sekunder. Detta kan behöva justeras beroende på huvudmaterialens komposition och yta. Prova alltid på en mindre bit innan du genomför applikationen.

Klipp ut materialen som du vill fästa ihop. Placera dem sida vid sida på ett silikonbakplåtspapper eller teflonpapper. Klipp en bit NRX® Heat Tape som täcker ytan plus några centimeter eftersom bandet kan krympa lätt vid uppvärmning. Placera bandet över skarven och täck sedan med ytterligare ett silikonbakplåtspapper eller teflonpapper. Använd antingen ett strykjärn eller en värmepress ställd på 120–140 grader Celsius. Om du använder ett strykjärn, koppla bort ångfunktionen. Applicera värmen över ytan och tryck lätt i ca 10 sekunder. Kontrollera resultatet, om tejp inte fäst helt, återupprepa processen med något längre exponeringstid.

För att få en stark infästning rekommenderas det att appliceras tejp på både över- och undersidorna över skarven.

Tvättinstruktion för det laminerade materialet är i enlighet med huvudmaterialets tvättråd.

### NRX® Heat Tape

EU490001 NRX® Heat Tape 22 mm x 10 m roll, Svart

NRX® är ett registrerat varumärke av Mediroyal Nordic AB

© Mediroyal Nordic AB 2021