



mediroyal

Orthoses are our passion

# Proxi® UCL

## MR2336 · Mediroyal Proxi® UCL

Mediroyals nya Proxi® UCL tumme är en ny tumortos i Proxi®-serien, designad för patienter med skador på det ulnara kollateralligamentet, UCL. Ortosen kan användas direkt efter mildare trauma eller post-operativt efter gipsbehandling. Den kan också användas för generella instabiliteter i tummen för att stödja CMC- och MCP-lederna.

Den unika Proxi®-tekniken kombinerar stabiliteten från termoplast i kombination med komforten från en textil ortos. Den 2,2 mm tjocka molekylärt modifierade termoplasten har maximal stabilitet i den vertikala riktningen men är flexibel i den horisontella riktningen. Detta gör det möjligt att kunna modifiera volym och storlek genom att med handkraft böja termoplasten utan att behöva använda varmluft eller varmvatten. Det är så enkelt som det låter.

- **Integrerad 2,2 mm microperforerad termoplast för stabilitet**
- **Justerbart IP-ledsband**
- **Flexibel IP-zon för gradvis ökad flexion i IP-leden**
- **Lågprofilhake över tumdelen och handleden**

Proxi® är ett registrerat varumärke tillhörande Mediroyal Nordic AB.

© Mediroyal Nordic AB 2020




Mediroyal Proxi® är tillverkad av det populära Neptune™-materialet som är andningsaktivt, hydrodynamiskt och torkar snabbt. Ortosen har lågprofilhake över handleden och tumdelen som kan fästas mot ortosens översida. Thermoplasten är laminerad under en TPU-film för att skydda den. Tumdelen är längre än på normala tumortoser för att ge mer stöd över IP-leden. Thermoplastdelen över tummen har två sköldar på vardera sidan om IP-leden för att ge mer stöd över leden. Ortosen har också ett IP-band som används för att ge mer individuellt stöd över leden.

På palmarsidan av tumdelen finns en flexibel IP-zon som kan klippas och justeras för att tillåta flexion av IP-leden gradvis under rehabiliteringen. IP-bandet kan också klippas bort när behovet för extra stabilitet inte längre behövs. Ortosens design har inga kantband vilket gör det möjligt att justera kanterna med hjälp av en sax. Undvik att klippa över området där plasten är placerad och över kardborrebanden. Alla andra delar kan justeras.

**Indikationer:** Skador på tummens ulnara kollateralligament (UCL), radiala kollateralligament (RCL), distorsionsskador på MCP eller generella instabiliteter i tummen.



#### Måttabell

MR2336 Proxi® UCL · Finns i vänster- och högerutförande						
Size	XS	S	M	L	XL	
mm	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	

Proxi® är ett registrerat varumärke tillhörande Mediroyal Nordic AB.

© Mediroyal Nordic AB 2020

Orthoses are our passion

