

TVILLINGFÖRBAND



DET DESIGNADE TVILLINGFÖRBANDET, MED ÖGLA, gör det enkelt att applicera och håller fingrarna ordentligt samman.

SÅ ANVÄNDER DU FÖRBANDET

Tvillingförbandet används för att skydda över två och/ eller tre fingrar. Öglan på tvillingförbandet appliceras på det skadade fingret. För därefter bandet under och runt det angränsade fingret. Fixera och säkra tvillingförbandet med hakdelen som finns i ena änden av bandet.

VID SKYDD AV 4:E & 5:E FINGRET

Applicera öglan på tvillingförbandet runt lillfingret, ner mot basen av fingret. För därefter bandet i sned vinkel under ringfingret distalt om PIP-leden. Fäst bandet över mellanfalangen på ring - och lillfingret med hjälp av hakbandet.

INDIKATIONER

Vid lätta Distorsioner, vid ömma och svullna fingrar, med en partiell/total ligamentskada i PIP-leden samt vid lätta stabila fraktur-luxationer.

ENASTÅENDE KOMFORT


13 MM BREDD



19 MM BREDD



26 MM BREDD

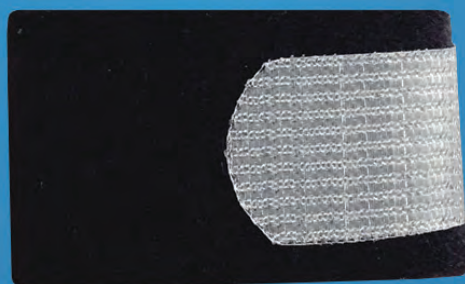

TVILLINGFÖRBANDEN ÄR TILLVERKADE

AV ett tvättbart, antiglidskum-fodrat och ventilerande material som erbjuder en enastående komfort genom att materialet ligger tätt intill huden vilket hindrar glidning. Latexfritt. Finns i 13 mm, 19 mm och 26 mm bredd i en längd. Förpackningar om 5, 25, 50 och 100 stycken. Idealiska för användning under arbete, fritids- och sportaktiviteter och långtidsanvändning.

TVÄTTINSTRUKTIONER

Hand- eller maskintvätt med kallt vatten och mild tvättmedel. För bibehållen passform och för längre hållbarhet av tvillingförbandet: Skölj i kallt vatten upp till två gånger dagligen. Kallt vatten aktiverar materialets minne som försäkrar att bandet behåller sin originalstorlek.

MATERIAL

Töjbart skummaterial i nylon och lycra. Latexfritt. Materialet tillåter att klippas i med sax utan att det repas upp i kanterna. Klipp inte genom sydda sömmar.

1003, 1005, 1007 TVILLINGFÖRBAND

1003-5 Tvillingförband 19 mm, 5 st
1003-25 Tvillingförband 19 mm, 25 st
1003-50 Tvillingförband 19 mm, 50 st
1003-100 Tvillingförband 19 mm, 100 st

1005-5 Tvillingförband 13 mm, 5 st
1005-25 Tvillingförband 13 mm, 25 st
1005-50 Tvillingförband 13 mm, 50 st
1005-100 Tvillingförband 13 mm, 100 st

1007-5 Tvillingförband 26 mm, 5 st
1007-25 Tvillingförband 26 mm, 25 st
1007-50 Tvillingförband 26 mm, 50 st
1007-100 Tvillingförband 26 mm, 100 st



mediroyal 

Mediroyal Nordic AB
Box 7052, 192 07 Sollentuna, Sweden
Visiting address: Staffans väg 6B, Sollentuna
Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90

www.mediroyal.se
info@mediroyal.se
facebook.com/Mediroyalnordic