

MEDIROYAL EPI-STRAP

MR2600



Nya Mediroyal Epi-Strap är en kombination av ett fast spänne och ett mjukt band.


Den är gjord av ett högteknologiskt tyg och en kärna av termoplast som har svetsats samman med högfrekvent-svetsning. Resultatet är en flexibel och funktionellt band med ett bra stöd. Omkretsen är justerbar med kardborre som kan fästas var som helst på ytan. På insidan av bandet finns en silikonpelott som är täckt med textil och som fästs med kardborre. Pelotten

kan placeras var som helst på insidan, men den bästa effekten uppnås när den placeras över den större ytan av bandet. Den bästa effekten uppnås när bandet appliceras 3-5 cm under armbågsvecket, på den högsta punkten av muskeln. Se till att bandet sitter bekvämt och inte för hårt. När du böjer upp handen skall du känna ett lätt tryck över området där pelotten sitter.

INDIKATIONER Lateral epikondylit (tennisarmbåge).

MR2600 Mediroyal Epi-Strap

Universal storlek, 20-36 cm. Mättet tas 3-5 centimeter under armvecket.

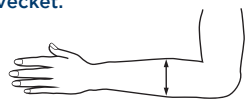

mediroyal 

Mediroyal Nordic AB

Box 7052, 192 07 Sollentuna. Sweden

Visiting address: Staffans väg 6B. Sollentuna

Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90

www.mediroyal.se

info@mediroyal.se

facebook.com/Mediroyalnordic