

Hydrokollator

Instruktion för ST35M1(WDB1/2) och ST35M2(WDB2/2)

Allmän information:

- # Hydrokollatorn måste stå helt plant innan den installeras
- # Fritt utrymme på alla sidor min 8cm
- # För den elektriska installationen behövs en godkänd, (S-märkt) väggkontakt, 230V/50Hz med en säkring på max 16A.
- # Väggtuttaget skall vara anslutet till elcentral med jordfelsbrytare, annars måste en sådan kopplas mellan vägguttag och hydrokollator
- # Dessa apparater får inte användas i rum där det föreligger explosionsrisk eller med en luftfuktighet överstigande 75%

Monteringsanvisningar:

1. Ta hydrokollatorn ur kartongen. Kontrollera att enheten inte är transportskadad. Lyft på locket. På insidan finns en ram med nät som skall användas i botten samt ett handtag.
2. Handtaget skruvas i sidan på locket där det finns ett hål. Du kan välja antingen höger eller vänster. Droppa lite olja på skruven innan du skruvar i den. Det gör att det går lättare. Vid behov använd en tång. Se till att brickan hamnar mellan metallhylsan och locket.
3. Lägg ned metallramen med nätet i botten. Fyll på med vatten, minst 5 cm över metallnätet. Du kan fylla upp till 4 cm under den övre kanten.
4. Kontakten skall alltid användas i ett jordat uttag. En jordfelsbrytare är alltid bra att använda mellan enheten och kontakten, om det inte finns en inbyggd jordfelsbrytare i elsystemet. Jordfelsbrytaren identifierar direkt om det skulle bli ett jordfel på enheten eller i elsystemet och räddar liv.
5. Slå på strömbrytaren på framsidan. Den lyser när enheten är påslagen.

Inställningar:

När du slår på enheten syns temperaturen i den digitala displayen. Eheten är försedd med en termostat som håller temperaturen konstant. Innan enheten kan börja användas måste man ställa in temperaturen som enheten skall hålla. Detta görs enligt följande:

1. Tryck in knappen märkt "SET" på displayen. Temperaturen som visas är den för inställda temperaturen i Celsiusgrader. På ny enhet står det normalt 0.00.
2. För att ställa in temperaturen, håll in "SET-knappen" samtidigt som du trycker på knappen märkt "▲". Varje tryck ökar temperaturen med 0.1 grad. Håller du in "▲" rullar temperaturen upp snabbare på displayen. Normalt rekommenderas mellan 65-75 grader.
3. För att sänka temperaturen, håll in "SET-knappen" samtidigt som håller in knappen märkt "▼".
4. Temperaturinställningen för hydrokollatorn är mellan 30-95 grader Celsius.

Skötsel­anvisningar:

Det är viktigt att enheten underhålls regelbundet för att den skall fungera felfritt. På grund av olika hårt vatten i Sverige rekommenderar vi destillerat vatten. Använder du vanligt kranvatten, tänk på att byta detta minst 1 gång i veckan. Kokar 50 % av vattnet bort och du ersätter det med nytt så ökar hårdheten på vattnet. Detta kan leda till att plasterna betar sig annorlunda. Vid behov, avkalka enheten med citronsyra och vatten eller avkalkningsmedel. Vi rekommenderar avkalkning minst var 6:e månad. I delar av Sverige finns också järnhaltigt vatten. Detta kan ge rostbruna avlagringar som kan vara svåra att få bort.

Tekniska Uppgifter

WDB2/4

Kapacitet	25 Liter
------------------	-----------------

Yttermått:

Längd	57 cm
Bredd	42 cm
Höjd	28 cm

Innermått:

Längd	49 cm
Bredd	35 cm
Djup	13 cm

Element	900W
Spänning	230V/50Hz
Säkring(snabb)	6,3x32 -0,8 A
Temperaturområde	30-95 C
Reglering	Elektronisk
Reglerings intervall	0,1 C

Garanti

- Denna Hydrokollator uppfyller standarderna för CE märkning samt EMC direktivet.
- Vi garanterar en felfri funktion av apparaten såvida man följt riktlinjerna för den här bruksanvisningen och anslutningen av apparaten sker i ett jordat uttag. Garantitiden är 12 månader från inköpsdatum.
- Vid reklamation kommer apparaten lagas om möjligt, annars ersätts den med en ny.
- Vid retur, vid reklamation skall detta ske i originalförpackningen. Således får förpackningen ej slängas innan garantitidens slut. Transportskador vid retur som uppstår pga. otillräcklig förpackningen står köparen för, i detta fall upphör garantin att gälla.

Denna Hydrokollator är CE-märkt och EMC certifierad av Heuser Apparatebau GmbH, Tyskland

Återförsäljare för Skandinavien är:

MediRoyal Nordic AB

Box 7052 SE-192 07 Sollentuna, Sverige Tfn: +46-8-506 766 00 Fax: +46-8-506 766 90
Email: info@mediroyal.se Hemsida: www.mediroyal.se

