



Omox Secure - Arm/Axel Immo

MR01104-U

Omox Secure stabiliserar och låser arm och axel efter trauma eller kirurgiskt ingrepp i syfte att helt förhindra oönskade rörelser. Produkten fixerar effektivt arm och axel med hjälp av oelastiska band runt överarm och underarm, vilka fästs mot ett stabilt bålband. Ett axelband bidrar till ytterligare fixering genom att låsa underarmen.

Vid behov av rörelseträning kan handledsmanschetten öppnas separat, vilket frigör armen utan att överarmens fixerade läge påverkas. Detta möjliggör fri rörlighet i armbågsleden samtidigt som axeln förblir stabiliserad.

Omox Secure är enkel att ta av och på, även för patienten själv. Den är utformad för att passa både höger och vänster arm och finns i svart i universalstorlek. Axelbandet kan anpassas individuellt genom att justera och korta bandets längd för optimal passform.

Indikationer: produkten är utformad för att ge stöd och immobilisering av arm och axelled efter operation eller skada. Stabiliserar, avlastar och minskar rörelsen i arm och axel.

Appliceringsguide Omox Secure - Arm/Axel Immo



1. Fäst bröstbandet runt bålen.



2. Fäst överarmsmanschetten på bröstbandet i lämplig höjd och position för extra stöd. Manschetten är justerbar och kan placeras fritt med kardborre.



3. Fäst handledsmanschetten på bröstbandet och spänn runt handleden så att den sitter tätt och stabilt. Tumband medföljer som kan fästas mot manschetten.



4. Fäst axelbandet på baksidan av bröstbandet. Koppla spännet till handledsmanschettens spänne. Justera längden efter behov. Bandet kan kortas ned med en sax.