

## Bruksanvisning Omox Secure - Arm/Axel Immo

MR01104-U

### Generell information

Läs denna instruktion noggrant innan användning.

Om du har drabbats av en skada bör du kontakta läkare eller terapeut för en individuell rehabiliteringsplan. Vid nedsatt cirkulation, känselbortfall eller diabetes ska du vara särskilt uppmärksam på tryckmärken eller lokal svullnad under användning.

Om besvären förvärras under användning ska produkten tas av omedelbart och läkare kontaktas.

Om produkten har ordinerats eller provats ut av medicinsk personal, såsom arbetsterapeut, fysioterapeut, ortopedtekniker eller läkare, ska du följa deras råd och instruktioner.

Följ tvättanvisningarna på etiketten. Om du har materialallergi finns materialkompositionen angiven på produktens etikett. För mer information, besök [www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se).

### Indikationer

Produkten är utformad för att ge stöd och immobilisering av arm och axelled efter operation eller skada.

Omox Secure har flera fixerande funktioner som bidrar till att stabilisera, avlasta och minska rörelsen i arm och axel.

### Kontraindikationer

Patienter med instabila frakturer ska inte använda denna ortos förrän frakturen har stabiliserats.

#### Förberedelse för applicering

Produkten är i universalstorlek och kan användas på både vänster och höger sida. Den består av 4 delar:

1. Bröstband, 2. Överarmsmanschett, 3. Handledsmanschett och 4. Axelband

### Applicering, se bild nästa sida

1. Öppna kardborren på bröstbandet (1) och placera det runt bålen, strax under bröstet. Fäst kardborren så att bandet sitter stabilt och bekvämt.

2. Fäst överarmsmanschetten (2) på bröstbandet i lämplig position för extra stöd. Manschetten är fullt justerbar och kan placeras fritt längs bröstbandet med kardborre för optimal fixering.

3. Fäst handledsmanschetten (3), som stabiliserar underarmen och handleden. Placera den hårda kardborreytan mot bröstbandet så att plastspännet hamnar uppåt. Spänn manschetten runt handleden så att den sitter tätt och ger effektiv fixering. För ökat stöd och komfort kan det tunna bandet i manschetten användas för att stödja tumme och hand.

4. Fäst axelbandet (4) på baksidan av bröstbandet. Koppla spännet till handledsmanschettens spänne. Justera längden efter behov. Bandet kan vid behov kortas med en vass sax.

Längden på banden samt handledens och överarmens position kan justeras individuellt för bästa stabilitet och komfort.

1. Bröstband



2. Överarm



3. Handled



2. Axelband



## Avtagning av produkten

1. Säkerställ att den opererade armen eller axeln har ett stabilt stöd.
2. Öppna axelbandet genom att trycka på mitten av spännet.
3. Lossa handleds- och överarmsmanschetterna genom att öppna kardborrebanden framtill.
4. Avsluta med att öppna bröstbandets kardborre.

## Materialinnehåll

Se produktens etikett för fullständig information om material.

## Skötselanvisningar och försiktighetsåtgärder

Vi rekommenderar att produkten tvättas en gång i veckan.

Följ tvättanvisningen på etiketten, stäng alla kardborreband och använd en tvättpåse.

Patienter med känslig hud, diabetes eller nedsatt cirkulation bör vara extra uppmärksamma på eventuella tryckmärken. Vid frågor eller funderingar, kontakta din vårdgivare.

Personer med allergier bör kontrollera materialinnehållet på etiketten innan användning.

## Måttabell

Produkten tillverkas i en universell storlek som passar både män och kvinnor.

Den kan användas på både höger och vänster sida.

## Återvinning

Sortera produkten enligt lokala riktlinjer för återvinning.

Tillverkad av  
Mediroyal Nordic AB  
Box 7052  
Staffans väg 6 B  
SE-192 07 Sollentuna  
08-50676600