

Bruksanvisning

Nea Stabil handledsortos med snörning



1. Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs denna bruksanvisning noggrant och följ samtliga anvisningar.

Ortosen får endast användas enligt läkares ordination samt efter individuell anpassning och instruktion av ortopedingenjör. Kontrollera före varje användning att ortosen inte är skadad, till exempel på spännen, remmar eller kardborreband. Felaktig anpassning eller användning, samt bristande kontroll av passform, kan leda till hälsoskador. Följ angivna krav för användningsmiljö och förvaring av produkten. Ortosen är avsedd för en enskild patient och får inte återanvändas efter avslutad behandling. För hårt åtdragen ortos kan orsaka cirkulationsstörningar och hudskador. Om obehag uppstår eller om tillståndet försämras ska läkare eller ortopedingenjör kontaktas. Använd inte produkten vid angivna kontraindikationer, vid synliga skador eller funktionsfel, eller vid känd överkänslighet mot något av materialen. Vid användning på barn får påtagning och avtagning endast utföras av vuxen anhörig eller vårdpersonal. Patienten får inte ändra inställningar som utförts av läkare eller ortopedingenjör och får inte manipulera ortosen. Ortosen får aldrig bäras direkt på skadad hud. Vid felaktig användning eller otillåtna ändringar upphör produktansvaret att gälla.

2. Användningsområde

Handledsbandaget används för immobilisering och stabilisering av handleden. Bandaget omsluter handleden cirkulärt och sluts med ett kombinerat snör och kardborresystem, vilket möjliggör enkel applicering med en hand. En uttagbar och individuellt anpassningsbar aluminiumskena i handflatan samt två smala fast integrerade plastskivor på handryggens sida stabiliserar den drabbade handleden. Tummen fixeras med ett separat kardborreband.

3. Indikationer Karpaltunnelsyndrom, Preoperativ och postoperativ behandling efter handledsskador, Pareser, Distorsioner
Inflammatoriska och reumatiska sjukdomar

4. Kontraindikationer Omfattande hudskador, Lymfödem i armen, Arteriell kärlsjukdom, Överkänslighet mot något av materialen
Cirkulations eller känselstörningar i arm eller hand

5. Produktkomponenter, mått och storlekar



Storlek	Omkretsmått cm	Höger	Vänster
XS	- 15	02 H 001	02 H 002
S	15 - 17	02 H 003	02 H 004
M	17 - 19	02 H 005	02 H 006
L	19 - 21	02 H 007	02 H 008
XL	21 -	02 H 009	02 H 010

6. Användning av produkten

För patient och ortopedingenjör
Ta ut bandaget ur förpackningen och öppna samtliga kardborreband.
För in handen i bandaget under stickmaterialet. Den breda aluminiumskenan ska ligga mot handflatan. Skenan kan tas ut och anpassas individuellt av ortopedingenjör.
Dra åt bandaget med det breda kardborrebandet som sitter i slutet av snörningen genom att föra det runt handledens undersida och insida. Vid behov kan kardborrebandet kortas med sax så att det inte fäster i snörningen och orsakar slitage.
Stäng kardborrebandet runt tummen och fäst det mot öglamaterialet. Även detta band kan kortas vid behov.
Bandaget ska sitta stadigt så att handleden är stabiliserad samtidigt som fingrarna är rörliga. Undvik att skapa tryckpunkter.

7. Material

Velourläder, Polyester, Nylon, Bomull, Polypropen, Aluminium

8. Rengöring, skötsel och underhåll

Stäng samtliga kardborreband och ta ur aluminiumskenan. Tvätta bandaget för hand i 30 grader med mildt fintvättmedel. Använd inte starka tvätt eller blekmedel. Lufttorka bandaget. Använd inte torktumlare och stryk inte.

9. Användningsförhållanden, förvaring och avfallshantering

Skydda produkten mot smuts och starkt ljus. Förvara torrt i rumstemperatur och helst i originalförpackningen. Ortosen innehåller inga miljöfarliga ämnen och kan slängas i hushållsavfall.

10. Förklaring av symboler

	Lotnummer
	Artikelnummer
	Bruksanvisning ska läsas
	Överensstämmelse med kraven i medicintekniska direktivet 93/42/EEG
	Tillverkare

11. Tillverkare och distributör



neaTec GmbH, Dieselstr. 6, 89231 Neu-Ulm
Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289
www.neatec.de info@neatec.de



12. Revisionsstatus Utgåva januari 2013