


Orthoses is our passion



Thermoplaster


Lågtemperaturplaster ger en möjlighet till att individuellt tillverka och anpassa ortoser till patientens specifika behov. T-Tape Company är en av världens största tillverkare av thermoplaster och Mediroyal är exklusiv distributör i Skandinavien.

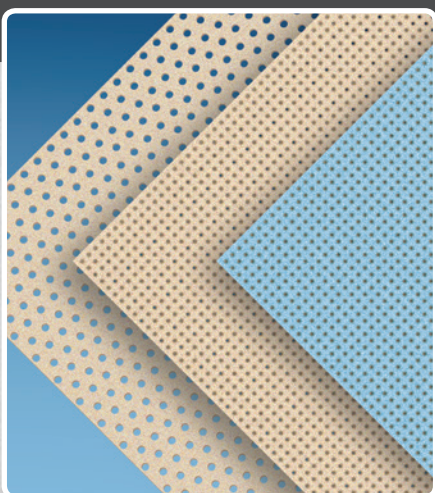

Turbocast®

Den klassiska thermoplasten Turbocast som gör ortostillverkningen enklare. Plastens yta har ett tunt skumskikt som gör att den inte kladdar oavsiktligt. Vill du ha en infästning trycker du bara ihop ytorna och plasten laminerar. Enkelt att forma och med ett medelhögt minne. Rekommenderad temperatur 70–75° C. Lämplig för fingerortoser, tumortoser och halvcirkulära ortoser.

Art.	Tjocklek	Färg	Perforering	Arkstorlek
T0810	0,8 mm	Beige	Micro	45 x 60 cm
T1610	1,6 mm	Beige	Micro	45 x 60 cm
T1612	1,6 mm	Blå	Micro	45 x 60 cm
T2010	2,0 mm	Beige	Micro	45 x 60 cm
T2012	2,0 mm	Blå	Micro	45 x 60 cm
T2530	2,5 mm	Beige	Multi	45 x 60 cm

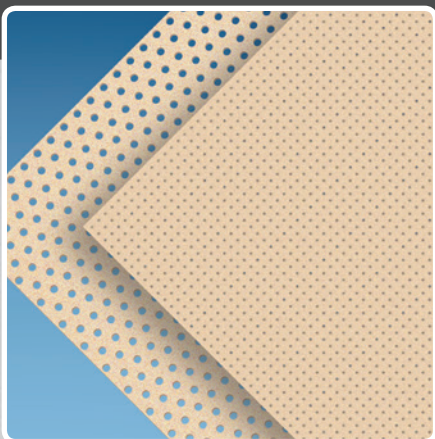

Turbocast® Comfort

Denna kvalitet är fodrad med en komfortabel flock-yta som ger en överlägsen komfort. Den ena sidan på materialet fäster och flocksidan är non-sticky. Vi rekommenderar att du använder mallar som kräver överlappsinfästning för bästa resultat. Rekommenderad temperatur 70–75° C. Lämplig för tumortoser och halvcirkulära ortoser.


Art.	Tjocklek	Färg	Perforering	Arkstorlek
TRC1610	1,6 mm	Beige	Micro	45 x 60 cm
TRC2530	2,5 mm	Beige	Multi	45 x 60 cm



Immo Plus® Classic

Är ett lättarbetat material med hög formbarhet och som fäster i sig självt. Om materialet har lite vätska kvar blir det mer lättarbetat. Vid punktvärmning eller torrsvetsning blir lamineringen permanent. Rekommenderad temperatur 65–70° C. Lämplig för fingerortoser, tumortoser och tum- och halvcirkulära ortoser.

Art.	Tjocklek	Färg	Perforering	Arkstorlek
IB161	1,6 mm	Svart	Micro	45 x 60 cm
IRB161	1,6 mm	Blå	Micro	45 x 60 cm
IR161	1,6 mm	Röd	Micro	45 x 60 cm
IB201	2,0 mm	Svart	Micro	45 x 60 cm
IRB201	2,0 mm	Blå	Micro	45 x 60 cm
IR201	2,0 mm	Röd	Micro	45 x 60 cm
IB256	2,5 mm	Svart	Optio	45 x 60 cm
IRB256	2,5 mm	Blå	Optio	45 x 60 cm
IR256	2,5 mm	Röd	Optio	45 x 60 cm

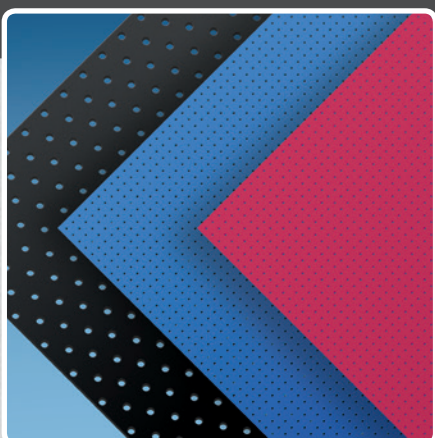

Immo Plus® NS

Samma lättarbetade kvalitet som Immo Plus men detta material har en yteläggning på båda sidorna som gör att den inte fäster lika lätt som Classic-kvaliteten. Det gör att materialet kan bearbetas mer aggressivt vid mer komplicerade modeller och är mer motståndskraftig för fingeravtryck. Vid punktvärmning eller torrsvetsning blir lamineringen permanent. Rekommenderad temperatur 70–75° C. Lämplig för fingerortoser, tumortoser och tum- och halvcirkulära ortoser.

Art.	Tjocklek	Färg	Perforering	Arkstorlek
IB161NS	1,6 mm	Svart	Micro	45 x 60 cm
IRB161NS	1,6 mm	Blå	Micro	45 x 60 cm
IR161NS	1,6 mm	Röd	Micro	45 x 60 cm
IB201NS	2,0 mm	Svart	Micro	45 x 60 cm
IRB201NS	2,0 mm	Blå	Micro	45 x 60 cm
IR201NS	2,0 mm	Röd	Micro	45 x 60 cm
IB256NS	2,5 mm	Svart	Optio	45 x 60 cm
IRB256NS	2,5 mm	Blå	Optio	45 x 60 cm
IR256NS	2,5 mm	Röd	Optio	45 x 60 cm